

DESCRIÇÃO: **MASCARA DE PROTEÇÃO**

REFERÊNCIA: **AG-502**



QUANTIDADE: **PACOTE COM 20 UNIDADES**

USO CORRETO DO EPI

- Este EPI é indicado para a proteção do rosto do usuário contra líquido pulverizado

ITENS INCLUSOS

- 1 (um) Visor de acetato (V)
- 1 (uma) Testeira de Acetato (TA)
- 1 (uma) Testeira de TNT (TT)
- 1 (uma) Fita elástica (F)

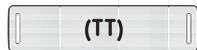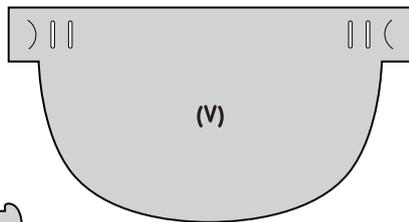

MONTAGEM

(FIGURA 01) Passe a Fita (F) pelo corte curvo A¹ da viseira (V) pela parte interna (PI) e puxe uns 10cm, agora passe através da abertura C¹ pela parte externa (PE) depois em B¹ (PI) e A¹ (PE).





(FIGURA 02) Na outra extremidade passe (F) pela A² (PI) da (V) e puxe uns 10cm, agora pelo C² (PE) e B² (PI) e passe pelo A² (PE)

(FIGURA 03) Passe a ponta D¹ da Testeira de Acetato (TA) na abertura E¹ da Testeira de TNT (TT) e depois passe a ponta D² da (TA) na E² da (TT).

Obs: Passe cada ressalto um de cada vez

(FIGURA 04) Entre a (V) e a (F) com a (TT) voltada para o lado da (F) Passe D¹ da Testeira de Acetato (TA) na abertura C¹ pelo parte interna (PI) do visor (V) agora passe D² da (TA) pela C² (PI) do (V)

Obs: Passe um ressalto um de cada vez

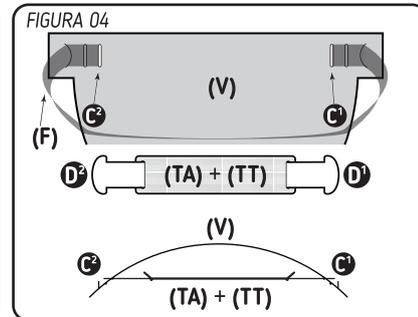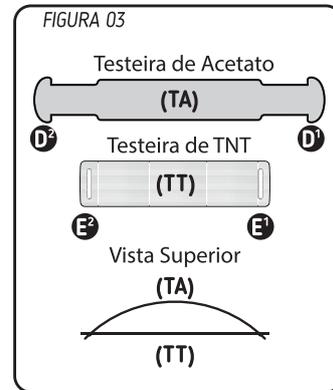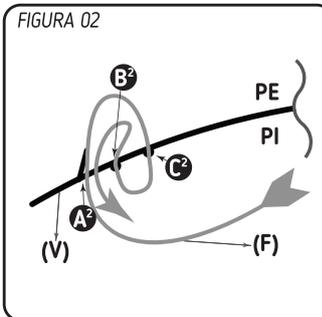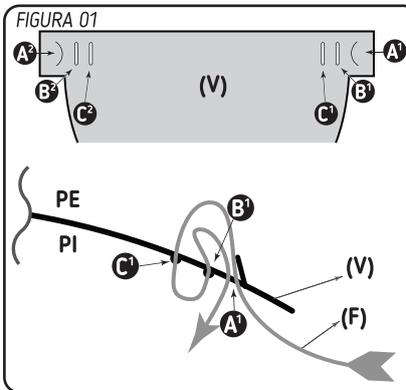

**Protspray Equipamentos
de Proteção Ltda**

CNPJ:02.915.532/0001-84

PRODUZIDO NO BRASIL

Rua Rosa Cruz, 1300 | Jd. Caparroz |

Catanduva-SP

CEP: 15.805-160

FONE: (17) 3524-9960

**MASCARA DE PROTEÇÃO
PACOTE COM 20 UNIDADES**